

# Dezinfekční řád Lavosept®

## dezinfekce na nástroje, plochy a ruce

Oblast použití	Četnost	Způsob aplikace	Název přípravku	Účinnost	Koncentrace aplikační	Expozice
Nástroje z chirurgické oceli, pomůcky z kovu, plastu, skla, aj.	po použití pomůcky či nástroje	ponořit do pracovního roztoku, po expozici opláchnout vodou	LAVOSEPT K - roztok na nástroje	AV	K přímému použití	30 min
Hygienická dezinfekce kůže	dle potřeby	umýt ruce mýdlem a nanést na suchou pokožku	LAVOSEPT K - roztok	ABV	K přímému použití	30 s
Hygienická dezinfekce kůže	při kontaminaci; před a po vyšetření pacienta; před výdejem stravy	umýt ruce mýdlem a nanést na suchou pokožku opakovaně po dobu 5 min	LAVOSEPT Gel kůže	ABV	K přímému použití	5 min
Hygienická dezinfekce kůže	před vpichem; před zavedením kanyly; před operačním zákrokem	místo vpichu dokonale smočit, nechat zaschnout, případně rozetřít tampónem	LAVOSEPT K - roztok	ABV	K přímému použití	30 s
Univerzální dezinfekce na kůži a nástroje	KŮŽE Hygienická dezinfekce kůže: na začátku pracovní směny; po použití toalety; před jídlem	umýt ruce mýdlem a nanést na suchou pokožku	UNIVERZÁLNÍ DEZINFEKCE NA KŮŽI A NÁSTROJE	ABV	K přímému použití	30 s
	Dezinfekce kůže: před vpichem; před zavedením kanyly; před operačním zákrokem	místo vpichu dokonale smočit, nechat zaschnout, případně rozetřít tampónem	UNIVERZÁLNÍ DEZINFEKCE NA KŮŽI A NÁSTROJE	ABV	K přímému použití	30 s
	po použití pomůcky či nástroje	ponořit do pracovního roztoku, po expozici opláchnout vodou	UNIVERZÁLNÍ DEZINFEKCE NA KŮŽI A NÁSTROJE	ABV	K přímému použití	30 min

Výrobce dezinfekce Lavosept®: AMOENÉ s.r.o., Freudova 415, Příbor 742 58, [www.amoene.cz](http://www.amoene.cz). tel.: +420 720 403 443, email: [marketing@amoene.cz](mailto:marketing@amoene.cz) / [www.amoene.cz](http://www.amoene.cz)

# Dezinfekční řád Lavosept® dezinfekce na plochy a podlahy včetně dezinfekce ponorem

Oblast použití	Četnost	Způsob aplikace	Název přípravku	Účinnost	Koncentrace aplikační	Expozice
Podlahy a obklady, chodby	1x denně a při kontaminaci	Setřít namokro a nechat uschnout	LAVOSEPT® K koncentrát	AV	0,5 – 1,0% Nutno naředit	30 min
Rychlá dezinfekce – malé plochy a předměty (vozíky, kliky, stoly, odpadkové koše, nábytek, aj.)	3x denně a při kontaminaci	Rychlá dezinfekce postřikem – nastříkat a po expozici opláchnout	LAVOSEPT K - roztok	AV	K přímému použití	30 min
Vany	po každém použití	nastříkat a po expozici opláchnout	LAVOSEPT K - roztok	AV	K přímému použití	30 min
Sociální zařízení – podlaha, WC, umyvadla, výlevky	2x denně	nastříkat a po expozici opláchnout	LAVOSEPT K - roztok	AV	K přímému použití	30 min

Dezinfekční přípravky ředíme zpravidla ve vodě 20 – 25 °C.

Při manipulaci, při přípravě a následné práci s aplikačními roztoky dezinfekčních přípravků je nutné se řídit pokyny a návodem, který udává výrobce zpravidla na obalu výrobků, příp. v příbalovém informačním letáku. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím vždy čtěte údaje uvedené na obalu.

A	baktericidní (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris)
V	fungicidní (Candida albicans, Aspergillus niger, Penicillium aurantiogriseum)
B	virucidní (E. coli bakterifág phi X 174 a hostitelská E. coli)

Výrobce dezinfekce Lavosept®: AMOENÉ s.r.o., Freudova  
415, Příbor 742 58, www.amoene.cz. tel.: +420 720 403 443,  
email: marketing@amoene.cz / www.amoene.cz